


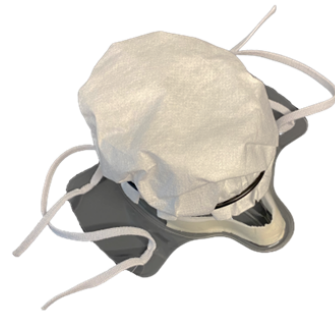

## FPM2 Mask Fonna/CE-0161

### Beschreibung der Maske:

Bei der Maske handelt es sich um eine Partikel filtrierende Atemschutzmaske. Zur Vermeidung von Leckageströmen und zum optimalen Tragekomfort ist die Maske in ihrer Geometrie optimal an die Gesichtskontur angepasst. 2 elastische Gummibänder, die in ihrer Länge fein justierbar sind, fixieren die Maske am Kopf und bieten einen angenehmen Tragekomfort. Bei ausreichender Zugkraft der Gummibänder liegt die Maske dicht an der Gesichtskontur an. Ein breiter Randfalz sorgt dabei für eine ausreichende Abdichtung der Maske.

Die Maske besteht aus einem aus PETG geformten Grundkörper und einem mittels O-Ring fixiertem wechselbarem Filter. Der wechselbare Filter besteht aus einer Filterschicht und einem Trägermaterial. Das Trägermaterial besteht aus "non woven Spinvlies". Die Filterschicht besteht aus non woven SMMS (Meltblown-) Material. Ein O-Ring fixiert den wechselbaren Filter mit dem Maskenkörper. Ein abwaschbarer, geschlossen poriger Schaumstoff in der Nasenkavität sorgt für einen bequemen Sitz der Maske. Der Filter kann gewechselt werden. Die Maske unterliegt den EN-Normen in der aktuell gültigen Fassung.

### Anwendungsgebiete:

Zur Verwendung speziell für den Infektionsschutz. NR (non reusable); entspricht dem einmaligen Gebrauch von 8 Stunden.

### Merkmale:

- Längenverstellbare Gummibänder ermöglichen eine eng anliegende Maske. Die Maske passt sich automatisch der Gesichtskontur an.
- Stabile und verwindungssteife Außenkontur
- Kein Beschlagen von Brillen beim Tragen der Maske
- 2 Haltebänder erleichtern das Aufsetzen der Maske
- Alle hautberührenden Teile sind hautverträglich
- Alle Materialien entsprechen den Vorschriften nach DIN EN 10204 2.1
- Die Maske ist nach der Prüfnorm EN1827:2009-11 geprüft
- Maske mit wechselbaren Filtereinsätzen (**nur mit Mematec Filtermaterial erfüllt die Maske die gesetzliche Norm**)

**Alle Teile der Maske sowie die Maskenkonstruktion ist „Made in Germany“  
Die Maske ist Patentgeschützt**


**Verpackungseinheit:** 20 Masken pro PE-Beutel + 20 Filtereinsätze pro Maske



1. Legen Sie die Gummibänder zur Seite und fassen Sie sie mit den Händen.



2. Setzen Sie die Maske auf Ihr Kinn und ziehen Sie die Gummibänder hinter die Ohren.

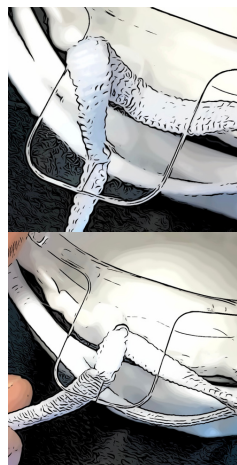

3. Passen Sie die Gummibänder nach Bedarf an.




4. Achten Sie darauf, dass die Maske bequem sitzt und sich eng an die Gesichtskontur anschmiegt.

**RICHTIGE VERWENDUNG:** Damit eine FPM2 Maske ihre volle Schutzwirkung entfalten kann, muss sie gemäß dieser beiliegenden Gebrauchsanweisung verwendet werden. Unter Anderem muss der richtige Sitz der Maske auf dem Gesicht und der Verlauf der Bänder gewährleistet sein.

### Achtung!

Nur ein optimaler Sitz gewährleistet, dass die Maske den definierten Schutz bietet !!!


## Filterwechsel

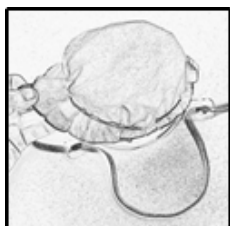

1. Um den alten Filter zu entfernen fassen Sie die Lasche oben an.  
2. Ziehen Sie den Filter an der Lasche vom Maskenkörper ab.




2. Reinigen Sie den Maskenkörper gründlich mit einer PH-neutralen Seife. Trocknen Sie die Maske anschließend vollständig ab.

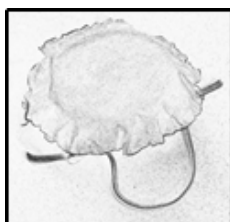

3. Setzen Sie einen neuen Filter auf den Maskenkörper. Der Filter muss gleichmäßig über die O-Ring-Halter gezogen werden.

Die fasrige Meltblownschicht ist nach innen zum PETG Grundkörper zu montieren. Somit zeigt die raue texturierte Spinnliesschicht nach außen.

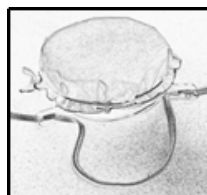

4. Setzen Sie den O-Ring über den neuen Filter auf den Maskenkörper. Ziehen Sie den O-Ring gleichmäßig über die Halterungen.

### Kontrolle:

Nach dem Filterwechsel muss die Dichtigkeit des Filters überprüft werden. Der Filterrand muss einen Abstand von mindestens 4 mm zum O-Ring haben!!!

### Hersteller:

Mematec Products GmbH  
August-Müller-Straße 24  
71691 Freiberg am Neckar  
info@mematec.com